

Pour une gestion du diabète
encore



simple¹⁻³

discrète⁴

efficace^{2, 5-8}




*Les appareils compatibles sont vendus séparément.

Disponible
chez tous les
grossistes


INSERTION DU CAPTEUR

1 Choisir la zone d'insertion

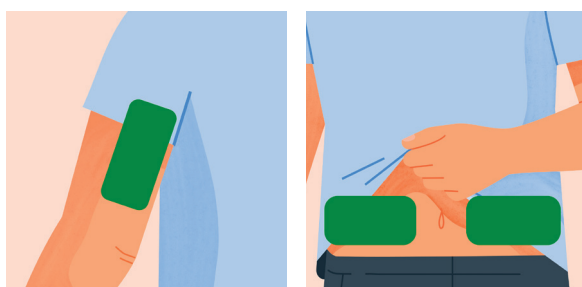

Arrière du bras

Abdomen

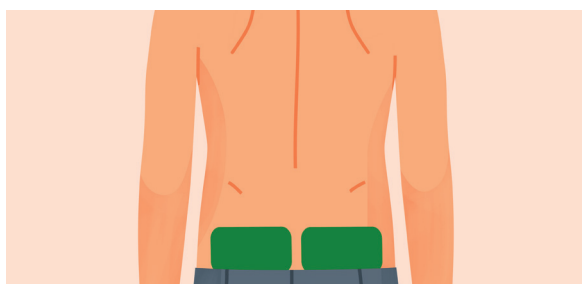


Haut des fesses
(seulement de 2 à 6 ans)

2 Nettoyer et sécher la zone



3 Insérer le capteur à l'aide de l'applicateur

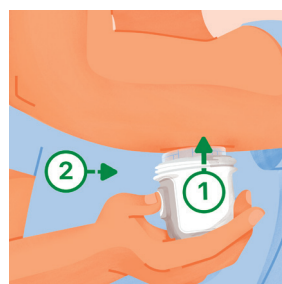

1. Maintenir l'applicateur contre la peau
2. Presser fermement le bouton


4 Appuyer pour optimiser l'adhérence



Effectuer 3 tours sur l'adhésif



Appuyer délicatement sur le capteur pendant 10 secondes

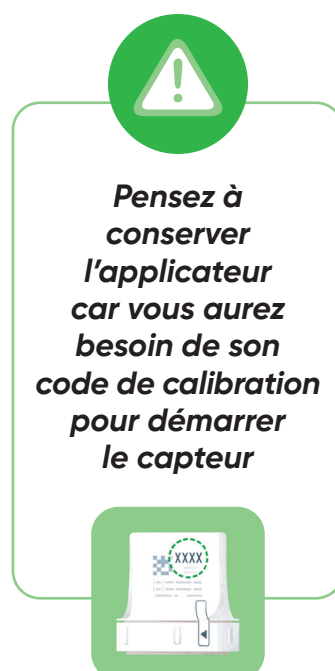

UNE ASSISTANCE À VOTRE DISPOSITION

dexcom.com/fr-fr



Des vidéos et contenus
produits éducatifs



Les réponses aux questions
fréquentes (FAQ)



Un accès au support et
à l'assistance technique

Assistance technique

L'équipe du support technique
Dexcom est à votre disposition :



0800 940 465 (appel gratuit)
(lundi au vendredi, 8h30 à 17h)



info.france@dexcom.com

Contacter
notre formateur



fr.info@dexcom.com